



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



# PRÉSENTATION DU KIT DE DÉPISTAGE

Programme de dépistage organisé du cancer colorectal

**DÉPISTAGE  
DESCANCERS**  
Centre de coordination




# Le kit de dépistage : l'enveloppe extérieure

- Format : 27 x 16,1 cm




Source : Groupement Cerba/DaklaPack®  
Traitement INCa, 2020

# Le kit de dépistage : l'enveloppe extérieure

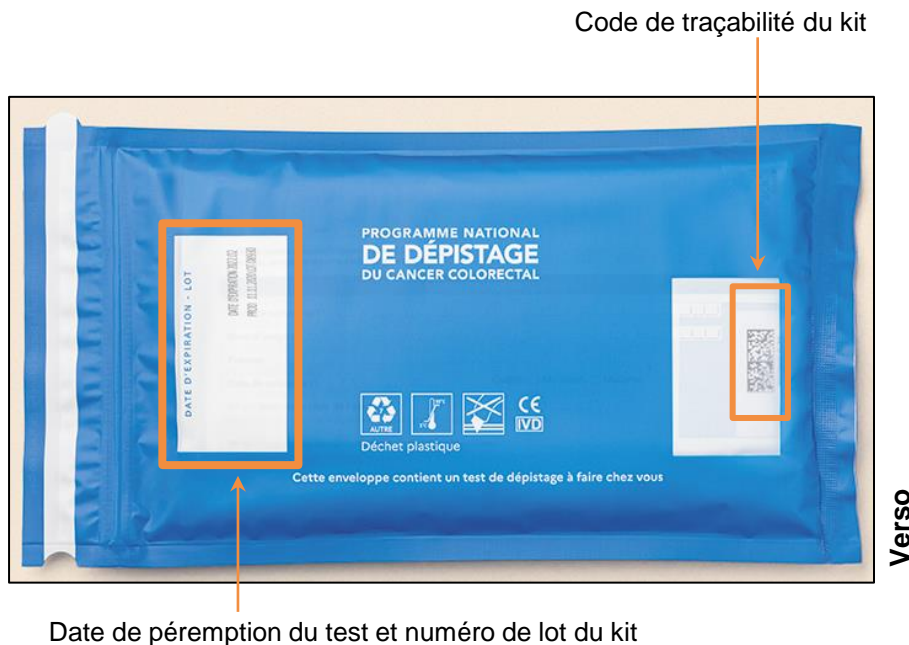

Source : Groupement Cerba/DaklaPack®  
Traitement INCa, 2020

# Le kit de dépistage : un kit en 3 volets

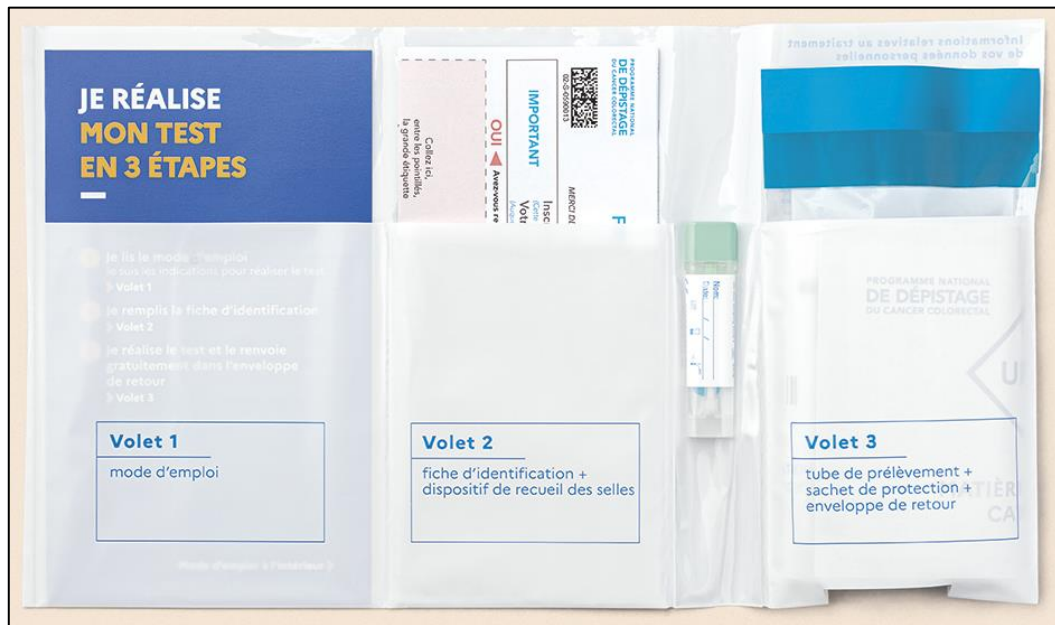

Source : Groupement Cerba/DaklaPack®  
Traitement INCa, 2020

# Le kit de dépistage : le mode d'emploi (volet 1)

## JE RÉALISE MON TEST EN 3 ÉTAPES

- 1 Je lis le mode d'emploi  
Je suis les indications pour réaliser le test.  
➤ Volet 1
- 2 Je remplis la fiche d'identification  
➤ Volet 2
- 3 Je réalise le test et le renvoie  
gratuitement dans l'enveloppe  
de retour  
➤ Volet 3

Mode d'emploi à l'intérieur ➤

## MODE D'EMPLOI

Avant de commencer,  
vérifiez la date d'expiration du test sur l'enveloppe ou sur le tube.  
Si le test est périmé, demandez-en un nouveau.

Je remplis la fiche d'identification:  
2 cas de figure

### J'ai reçu une lettre m'invitant à faire le test:

Sur la fiche d'identification  
(Volet 2 du kit):

- J'inscris la date de réalisation du test;
- Je colle la grande étiquette.



- Sur la petite étiquette, j'inscris la date de réalisation du test.
- Je la colle sur le côté plat du tube sur les mentions "Nom", "Date" déjà en place, puis je réalise le test.

2<sup>e</sup> CAS DE FIGURE

### Je n'ai pas reçu de lettre m'invitant à faire le test:

- Je remplis la fiche d'identification et son étiquette (Volet 2 du kit).
- J'y inscris la date de réalisation du test.



- Je colle l'étiquette sur le côté plat du tube sur les mentions "Nom", "Date" déjà en place, puis je réalise le test.

Je réalise mon test et je le retourne dans l'enveloppe prévue à cet effet.

**IMPORTANT:** pour que le test soit réussi, il ne faut pas que les selles soient en contact avec un liquide (urine, javel...).



- 1 Collez le papier de recueil des selles sur la lunette des toilettes à l'aide des autocollants. Appuyez doucement sur le papier pour faire un petit creux.



- 2 Ouvrez le tube en tournant le bouchon.



- 3 Grattez la surface des selles à plusieurs endroits à l'aide de la tige verte.



- 4 La partie striée de la tige (jusqu'à la marque rouge sur le dessin) doit être recouverte de selles.



- 5 Refermez bien le tube et secouez-le énergiquement. Jetez le papier de recueil dans les toilettes.



- 6 Vérifiez que vous avez bien rempli, daté et collé l'étiquette sur le tube. Glissez ensuite le tube dans le sachet de protection.



- 7 Glissez dans l'enveloppe de retour: le sachet de protection qui contient le tube, la fiche d'identification datée et complétée. Refermez l'enveloppe.



- 8 L'enveloppe de retour doit être postée au plus tard 24 heures après la réalisation du test (jamais le samedi ni la veille d'un jour férié).

➤ Les résultats vous seront adressés, ainsi qu'à votre médecin, sous 15 jours.

➤ Vous pouvez les recevoir par courrier ou par internet en vous inscrivant sur [www.resultat-depistage.fr](http://www.resultat-depistage.fr)

### Questions fréquentes

Quel est le délai d'utilisation du test?  
La date d'expiration est précisée sur le tube.

J'ai perdu le tube / le tube est abîmé. Que dois-je faire?  
Demandez un nouveau test à votre médecin.

Le prélèvement ne s'est pas passé correctement. Que dois-je faire?  
Prenez contact avec votre médecin; il vous conseillera et vous remettra un nouveau test.

Peut-il y avoir des erreurs dans les résultats?  
Dans de très rares cas (0,15%), une anomalie présente n'est pas repérée. Consultez votre médecin si des douleurs abdominales ou des troubles digestifs inhabituels et persistants apparaissent, ou en cas de présence de sang dans les selles.

### Plus d'informations

➤ Auprès de votre médecin.

➤ sur [e-cancer.fr](http://e-cancer.fr), rubrique "Comprendre, prévenir, dépister"

➤ Au 0 805 123 124 [www.119.gouv.fr](http://www.119.gouv.fr) du lundi au vendredi, de 9h à 19h et le samedi, de 9h à 14h.

➤ Auprès du Centre de coordination des dépistages des cancers de votre région.



Consultez ce mode d'emploi en vidéo, en flashant ce code, ou connectez-vous sur [videotestcolnecta.fr](http://videotestcolnecta.fr)

Source : Groupement Cerba/DaklaPack®  
Traitement INCa, 2020



# Le kit de dépistage : le dispositif de recueil de selles (volet 2)

- Facile à déplier
- Fixation sur la lunette des toilettes par des bandes adhésives
- Trous à l'avant pour l'évacuation des urines
- À jeter dans les toilettes après utilisation (délitable)



Source : Groupement Cerba/DaklaPack®



# Le kit de dépistage : le test immunologique

Tirer  
pour ouvrir



Etiquette déjà présente  
sur le tube à recouvrir  
avec l'étiquette prévue  
dans la lettre d'invitation  
ou sur la fiche  
d'identification

Date de péremption  
du test



Source : Groupement Cerba/DaklaPack®  
Traitement INCa, 2020

# Le kit de dépistage : le sachet de protection du tube (volet 3)

- Protection du tube de prélèvement pour l'envoi aux laboratoires
- Solide pour amortir les chocs et résister au traitement par La Poste



Insertion du tube après la réalisation du prélèvement dans le sachet



Fermeture du sachet avant de l'insérer dans l'enveloppe de retour

Source : Groupement Cerba/DaklaPack®

# Le kit de dépistage : l'enveloppe de retour (volet 3)

- À poster au plus tard 24h après la réalisation du prélèvement (jamais le samedi, ni la veille d'un jour férié)



Source : Groupement Cerba/DaklaPack®  
Traitement INCa, 2020

# Le kit de dépistage : l'enveloppe de retour (volet 3)



← Rappel des consignes  
pour l'envoi

Source : Groupement Cerba/DaklaPack®  
Traitement INCa, 2020

# La remise par un professionnel de santé : la commande de kits

- Les médecins généralistes, les gastroentérologues, les gynécologues et les médecins des CES peuvent obtenir des kits de dépistage en commandant :

Via leur espace professionnel sur [ameli.fr](https://www.ameli.fr)



Auprès du CRCDC

DÉPISTAGE  
DESCANCERS  
Centre de coordination


La liste des centres est accessible via :  
<https://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Se-faire-depister/Centres-regionaux-de-coordination-des-depistages-des-cancers>

- Livraison des kits de dépistage dans les 15 jours ouvrés après réception de la commande par Daklapack®

# Les étiquettes : identification de la personne


## Grande étiquette préremplie pour l'identification de la personne présente sur le courrier d'invitation

- Pour l'étiquette : Largeur : 7,7 cm / Hauteur : 5,8 cm
- Pour le code PDF417, à droite : Largeur : 3,49 cm / Hauteur : 1,32 cm

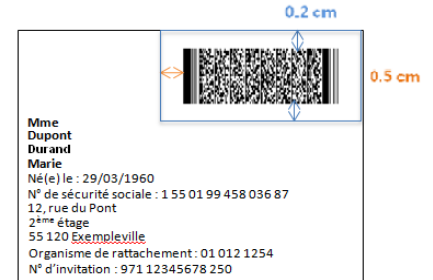

## Petite étiquette préremplie pour l'identification de la personne présente sur le courrier d'invitation

- Pour l'étiquette : Largeur : 6,0 cm / Hauteur : 1,5 cm
- Pour le code Data Matrix, à gauche : Largeur : 0,7 cm / Hauteur : 0,7 cm

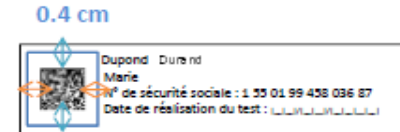

## Petite étiquette à remplir pour l'identification de la personne présente sur la fiche d'identification

- Pour l'étiquette : Largeur : 6,0 cm / Hauteur : 1,5 cm

Nom
Prénom
N° de sécurité sociale :
Date de réalisation du test : _____

Source : Groupement Cerba/DaklaPack®

# Les étiquettes : identification du médecin

## Grande étiquette préremplie pour l'identification du médecin lors de la commande par amelipro

- Pour l'étiquette : Largeur : 5,0 cm / Hauteur : 2,5 cm
- Pour le code PDF417 : Largeur : 3,49 cm / Hauteur : 1,32cm



- Celle-ci doit être fournie par le CRCDC lors d'une commande via ce dernier